

Tristel Solo para Ultrasonidos



Tristel Solo proporciona la desinfección de bajo nivel para sondas de ultrasonido transabdominales.

Características

- Combina la limpieza y la desinfección en un solo paso
- Bactericida, viricida y fungicida en 30 segundos
- Seguro y fácil de usar
- Espuma eficaz y rápido
- Dispositivo Médico Clase IIa

Aplicaciones

- Sondas abdominales y cualquier otra sonda de superficie de la piel y transductores de ultrasonido
- Teclados y soportes de sondas
- Monitores y paneles de control
- Cables y otro equipo y accesorios de ultrasonido
- Estetoscopios
- Manguitos de presión



Código: SOLO/ULT-200 ml

1 Solo 200 ml ~ 250 aplicaciones

Code: SOLO/ULT-50 ml

1 Solo 50 ml ~ 60 aplicaciones



Tristel Solo para Ultrasonidos

PHMB – El desinfectante de bajo nivel

Biguanidas han sido utilizados como agentes antimicrobianos en la preservación de los cosméticos y productos farmacéuticos y como antisépticos. Se han utilizado como desinfectantes durante más de 20 años y están bien documentados en su eficacia. PHMB está registrado con la EPA (Environmental Protection Agency - EE.UU.) para el control de bacterias patógenas gram-positivas y gram-negativas en el agua, y para la preservación y procesamiento de alimentos y bebidas.

El nombre químico completo para PHMB es polihexametilén biguinida.

Rendimiento de biocidas

Organismo	Tiempo de contacto	Tipo de prueba	Fuente de datos	Resultados
Norovirus Humano Virus Sars	30 segundos	Suspensión	BluScientific	Paso
<i>Candida albicans</i>	30 segundos	EN13624	Abbott International	Paso
<i>Staphylococcus aureus</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterococcus hirae</i>	30 segundos	EN13727	Mgs Laboratories	Paso