

NDP SurfaPlus

Desinfectante con alcohol
para toda clase de
superficies

- Bactericida y fungicida.
- 30% de contenido en alcohol, secado rápido y acabado brillante.
- Solución lista para usar.

Eurotrade ^{World} ✓
Commerce, S.L.

NDP SurfaPlus

Aplicaciones

Desinfección de equipos y superficies clínicas: camillas, mesas de operaciones, carros de curas, camas de hospitalización, pantallas, goteros, sillas de ruedas, carros de curas, interior de ambulancias, equipos de diálisis, etc.

Composición

- Cloruro de didecil dimetil amonio.
- 2-Fenoxietanol.
- Cinamaldehído.
- Isopropanol.
- Excipientes y agua.

Eficacia

- **Bacterias** (EN13697, EN1276):
Gram+: *Staphylococcus aureus*,
Enterococcus hirae.
Gram -: *Pseudomonas aeruginosa*,
Escherichia coli.
- **Hongos** (EN13697, EN1650):
Candida albicans, *Aspergillus niger*.

Los **principios activos** contenidos en el producto NDP SurfaPlus presentan además la siguiente eficacia: *Penicillium verrucosum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporium canis*, *Cladosporium cladosporioides*, *Penicillium verrucosum*, *Aspergillus versicolor* y virus con envoltura.

Presentaciones

- Envase de **750ml** en spray.
- Envase de **1.500ml** en botella.



NDP SurfaPlus es una solución lista para usar para la desinfección de camillas, mesas de operaciones, carros de curas, superficies de acero, pantallas de diagnóstico, equipos de diálisis, camas hospitalarias, etc.

Tiene un amplio espectro biocida y rapidez de acción frente a bacterias y hongos (incluyendo *Aspergillus*).

Es compatible con todo tipo de materiales.

Eficacia antibacteriana según Normas Europeas en sólo 1 minuto

Su formulación con alto contenido en alcohol (30%), asegura un **secado rápido** y un **acabado brillante**.

Modo de uso



1. Limpieza de la zona a desinfectar

En caso de suciedad visible y para mejorar los resultados de la desinfección, se recomienda limpiar la zona previamente.

La limpieza se hará horizontal en zig-zag, de arriba hacia abajo y de dentro hacia fuera.



2a. Desinfección por pulverización

Pulverizar NDP SurfaPlus hasta total impregnación. Dejar actuar hasta que se evapore. No requiere aclarado.



2b. Desinfección por aplicación con toallitas:

El producto puede ser aplicado también con las toallitas de NDP Kit Surfaces.

Para ello, puede utilizarse el formato de 1500ml.

Impregnar las toallitas con el producto, dejar un tiempo de 10 minutos para saturarlas. Aplicar directamente sobre las superficies a tratar.

Eurotrade World
Commerce, S.L.