

NDP Med Concentrado Plus

Desinfectante de Alto Nivel
para endoscopios

- Eficacia bactericida, micobactericida, fungicida y virucida.
- Solución concentrada.



Eurotrade ^{World} ✓
Commerce, S.L.

NDP Med Concentrado Plus

Aplicaciones

Desinfectante para todo tipo de endoscopios: flexibles y rígidos, con o sin lumen. También material médico-quirúrgico, material odontológico, equipos de Urología, Anestesiología, terapia respiratoria, etc.

Eficacia

- **Bacterias** (EN1276, EN14561): *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*, *Acinetobacter baumannii* poliR (multiresistentes), *Staphylococcus aureus* SAMR, *E. faecium* poliR, *E. coli* productor de BLEE.
- **Micobacterias** (EN14563, EN14348): *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium terrae*.
- **Hongos** (EN1650, EN14562): *Aspergillus niger*, *Candida albicans*.
- **Virus** (EN14476): VIH, VHB, VHC, Rotavirus, Coronavirus SARS, Vaccinia, Papovavirus y Polyomavirus.
- **Esporas:** AFNOR NF T 72-230.

Composición

- N-Duopropenida.
- Alquilaminas.
- Fenoxietanol.
- Alcoholes grasos.
- Excipientes.
- Agua.

Presentaciones

- Envase de **200ml** y **5L**.
- Envase de **1L** con dosificador.



NDP Med Concentrado Plus es un producto para la desinfección de Alto Nivel de endoscopios y material quirúrgico. Presenta un amplio espectro de actividad biocida, no desnaturaliza proteínas y previene la formación de biofilm. Es seguro y compatible con cualquier tipo de material.

Asegura una Desinfección de Alto Nivel según Normas Europeas en sólo 25 minutos, al 2%. Es la alternativa lógica al uso de glutaraldehído, sin aldehídos tóxicos ni vapores irritantes.

Solución activa estable durante 20 ciclos con eficacia garantizada

Desinfectante para todo tipo de endoscopios: flexibles y rígidos, con o sin lumen.

Modo de uso




- Preparación de la dilución de NDP Med Concentrado Plus 20 ml por litro de agua: 2%.
- Al preparar la dilución debe añadirse primero el agua tratada y después el producto desinfectante con el fin de minimizar la formación de espuma.

- Sumergir el material/instrumental en la solución.
- Asegurarse de que todos los canales están llenos de desinfectante.
- Dejar actuar durante 25 minutos en total inmersión.

- Aclarar las superficies externas e internas.

Se aconseja un **aclarado a presión** para los canales internos. Con el fin de no recontaminar el objeto desinfectado, se recomienda aclarar con **agua sanitaria**.

Almacenaje: Colgar verticalmente en áreas bien ventiladas.

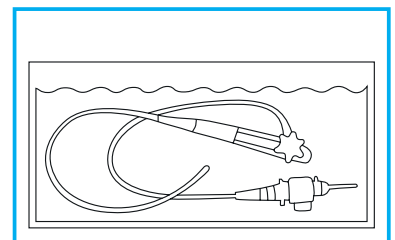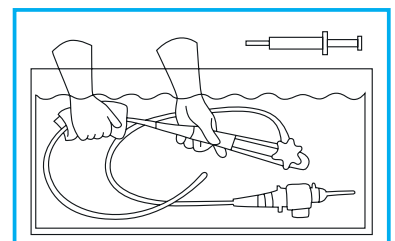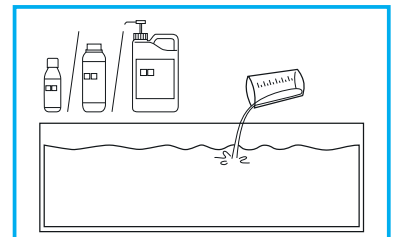

Eurotrade World
Commerce, S.L.